


Erreur DHCP / DNS

1. Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone et copiez les informations suivantes : adresse IP, masque de sous-réseau, routeur, DNS.

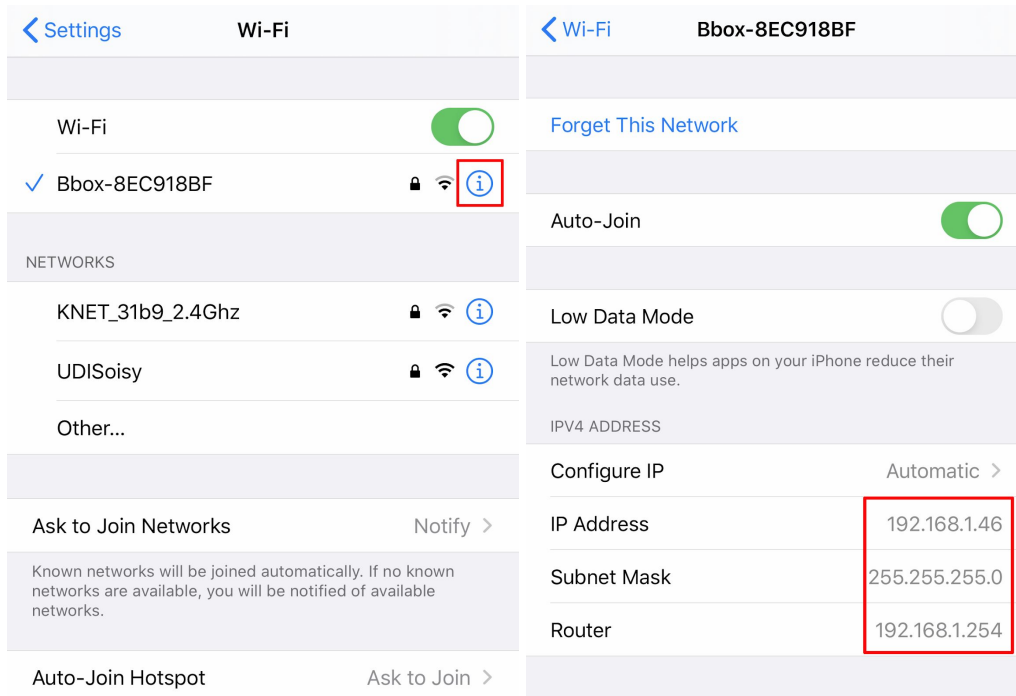

2. Lors de l'installation de votre balance, sélectionnez **Configuration rapide** pour utiliser le même réseau Wi-Fi que votre smartphone ou **Choisir un autre réseau** pour en utiliser un autre.



3. Si le pop-up **Partager vos paramètres Wi-Fi** apparaît, tapez **Ignorer**.

4. Activez la **Configuration Manuelle**. Pour ce faire, sélectionnez **Configurer l'IP > Manuel**.

The image shows two side-by-side screenshots of an iPhone's Wi-Fi settings. The left screenshot shows the 'Wi-Fi' settings for a network named 'Bbox-8EC918BF'. The 'Configure IP' option is highlighted with a red box, and it is currently set to 'Automatic'. The right screenshot shows the 'Configure IPv4' screen. The 'Manual' option is selected and highlighted with a red box. Below this, the 'MANUAL IP' section is visible with the following values: IP Address: 192.168.1.250, Subnet Mask: 255.255.255.0, and Router: 192.168.1.254.

5. Saisissez les **7 premiers numéros** de l'adresse IP et ajoutez «.250 ».

This image is similar to the previous one, showing the 'Configure IPv4' screen. In this version, the IP address fields are highlighted with red boxes to indicate where to enter the first seven digits of the IP address. The values are: IP Address: 192.168.1.250, Subnet Mask: 255.255.255.0, and Router: 192.168.1.254.

6. Copiez-collez les numéros du masque de sous-réseau, du routeur et du DNS.